



「シートマスター」取扱説明書

このたびは、「シートマスター」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要とときに取り出しやすい場所に保管しておいてください。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読みください。


●特徴

「シートマスター」は1枚状のシートのため、二つ折り、あるいは2枚を重ねて使用することで摩擦を軽減し、上下・左右・回転などベッド上の位置修正を容易に行うことができます。



●使用方法

- 二つ折りにしたシートを身体の下に敷き込み、利用者の身体をゆっくり移動させてください。
- 利用者の身体を支えながら、重なったシートの下側を持ちゆっくり引き抜いてください。

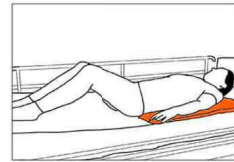

使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士;作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用してください。

- 使用後は床の上やベッドサイドなどに放置しないでください。滑ってケガをする恐れがあります。
- シートを敷きこんだまま放置しないでください。転落・転倒の危険があります。
- 介助者がいない側にはサイドレールを設置してください。
- 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用ください。
- 利用者を移動させる際に、シート本体を引っ張って使用しないでください。破損の原因となります。
- シートが濡れていると本来の機能が損なわれますので、乾いた状態でご使用ください。
- ベッドで上方移動を行なう際は頭部を守るために枕のご使用をお勧めします。
- 火気や鋭利なものは近づけないでください。破損の原因となります。
- 保管をする場合には、直射日光の当たる場所は避けてください。

●洗浄方法

- 85℃以下の温水または水で洗浄可能です。
- アイロンはご使用できません。
- 乾燥機をご使用の際は低温で行ってください。
- 柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。素材が劣化し、本来の機能が損なわれる恐れがあります。
- 70%アルコールで清拭消毒が可能です。

●商品規格

サイズ：80×160cm

素材：ナイロン

MADE IN DENMARK



商品に関するお問い合わせは

ラックヘルスケア株式会社

営業本部 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F

大阪ワイス 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2

九州ワイス 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山 2-1-23 パールビル帯山 1F

TEL03-5419-8050

FAX03-5419-8051

TEL06-6244-0636

FAX06-6244-0836

TEL096-340-8101

FAX096-340-8102

コード No. 2018.08