

回転クッション「イージーターン」取扱説明書

このたびは、回転クッション「イージーターン」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。

●使用方法

商品タグがついている面を下側にして使用して下さい。



使用上の注意

1. やわらかいソファ、クッションやシートなどの場合、「イージーターン」の中心部が沈み込み回転しにくい場合があります。
2. ナイロンなどの滑りやすい素材の上で使用した場合、滑り落ちる場合があります。
3. 本体の回転盤（2枚重ねのプラスチック部分）を無理に取り外さないで下さい。
接続部が壊れる恐れがあります。
4. 小さなお子様や座位保持できない方の使用は事故などないように十分注意して下さい。
5. 防炎加工はされておりませんので、タバコなど火気には十分注意して下さい。
6. 安全のため、運転中の運転席での使用はしないで下さい。

●お手入れ方法

丸洗いはできません。

柔軟仕上げ剤、漂白剤のご使用はできません。

汚れはよく絞った布でふき取って下さい。

ドライクリーニングはできません。

アルコールでふきとり消毒が可能です。

アイロンのご使用はできません。

直射日光を避けて保管してください。

●商品規格

直径 : 約 40cm

素材 : ポリエステル・ナイロン・PUコートナイロン・ポリエチレン

最大耐荷重 : 150kg

●原産国 中国 Made in China

商品に関するお問い合わせ先は

ラックヘルスケア株式会社

大阪 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2
東京 〒108-0014 東京都港区芝3-43-16 KDX 三田ビル11F
九州 〒862-0924 熊本市中央区帯山2-1-23 パークビル帯山1F

TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836
TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102