



ラックヘルスケア株式会社

## 「フレックスボード」取扱説明書



このたびは、「フレックスボード」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。



ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいて下さい。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読み下さい。



### ●特徴

「フレックスボード」の芯材は6つのセクションから成り立ち、アコーディオンのように折りたたみが容易に可能です。またそのフレキシブルな形状が移乗時の姿勢にぴったりフィットするため、角度のある車いすへの移乗にも使用できます。付属のスライディングシートは特殊加工で滑りやすく、持ち上げることなく移動・移乗できます。

●使用方法 寝た状態のまま、ベッド⇄ストレッチャー、ベッド、リクライニング・チルト車いすへの移乗ができます。

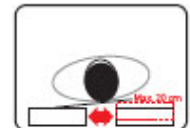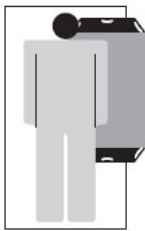

160 kg

### 使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士・作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用して下さい。

- ・ 持ち手の部分の保護シールをはがしてからお使いください。
- ・ 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用下さい。
- ・ ボード本体は柔らかい面と固い面がありますので、柔らかい面が利用者の体に面するようにご使用下さい。
- ・ 移乗側のベッド、ストレッチャー、車いすなどは必ずブレーキがかかっていることを確認してから行なって下さい。
- ・ 移乗間の距離は20cm以内として下さい。

### ●洗浄方法

- ・ 付属のスライディングシートは80℃以下の温水または水で洗浄可能
- ・ アイロンのご使用はできません。
- ・ タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行って下さい。

### ●商品規格

サイズ：110×50cm

素 材：ポリエステル、ポリエチレンフォーム、ポリエチレン

最大耐荷重：160kg

MADE IN DENMARK

商品に関するお問い合わせは  
**ラックヘルスケア株式会社**



営業本部 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F  
大阪カブ 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2  
九州カブ 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山 2-1-23 パール帯山 1F

TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051  
TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836  
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード No.2020.08