



## 「バイキングボード」取扱説明書

このたびは、「バイキングボード」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管しておいてください。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読みください。



M



L



### ●特徴


「バイキングボード」は、ベッド⇄車いす、車いす⇄トイレ、車いす⇄自動車などに橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗が行えます。独自の形状で移乗時に利用者の膝裏が当たりにくくなっています。表面はすべり易く、裏面は滑り止め加工が施されておりますのでスムーズな移動が可能です。グリップが3か所ついているため、持ち運びや、お尻の下に差し込む際に便利です。

### ●使用方法

利用者の移動させる側のお尻を浮かせ、お尻半分が掛かるようにボードを差込みます。

移乗後はボードを上方に引き上げるようにして取り外します。

使用時に上部持ち手部分を谷折りすると、車いすタイヤに緩衝しにくくなります。

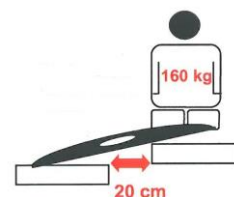

### 使用上の注意

ご使用にあたり理学療法士・作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用してください。

- 表面と裏面の保護シールをはがしてからお使いください。
- 移乗時には、必ず車いすのブレーキやベッドのキャスターにロックがかかっていることを確認してください。また、車いすはアームサポート、レッグサポートの取り外せるものを使用してください。
- 特に、皮膚の脆弱な方や痩せている方、おむつ着用の方など、皮膚へのリスクが考えられる方へ使用する場合は、必ず専門家に事前相談を行ってください。
- 橋渡しの距離は20cm以内としてください。
- ご使用にならない場合は高温になる場所は避け、ボードを平らな状態にして保管してください。
- 上部持ち手部分を谷折りに曲げることができますが、極端な折り曲げや反対方向への折り曲げ、または必要以上に繰り返し折り曲げを行うことは、破損の原因になりますのでおやめください。

### ●洗浄方法

中性洗剤を使用して水またはぬるま湯での洗浄可能。\*アルコール消毒可

### ●商品規格

サイズ(長さ×幅): M; 60×35cm L; 75×35cm

素材: ポリエチレン 最大耐荷重: 160kg



MADE IN DENMARK

商品に関するお問い合わせは  
ラックヘルスケア株式会社

mastercare  
HUMAN HANDLING SYSTEM

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

営業本部 〒105-0014 東京都港区芝 3-43-16 KDX 三田ビル 11F  
大阪ワイ 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2  
九州ワイ 〒862-0924 熊本県中央区帯山 2-1-23 パール帯山 1F

TEL03-5419-8050 FAX03-5419-8051  
TEL06-6244-0636 FAX06-6244-0836  
TEL096-340-8101 FAX096-340-8102

コード No. 2020. 12