



飛沫感染防止用 透明マスク

フレーム フェイスガード

ラックヘルスケア株式会社

飛沫から目・口・鼻を保護するのに最適です！



帽子をかぶったまま
つけれる設計です




透明なので、
様々な作業ができます



正面装着図


顔全体を覆っているので
体液・血液などの
飛沫が防止できます

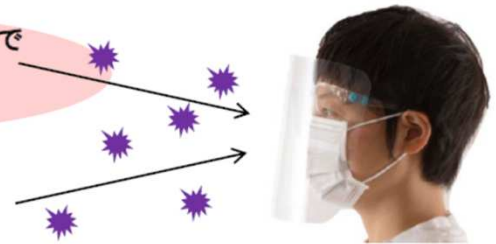

フェイスシールドの取り付け方




1
メガネフレームの留
め具を広げます。

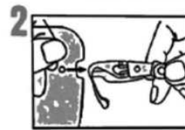

2
フェイスシールドの
穴を留め具の突起
に差し込みます。



3
留め具をフレームに
押し戻します。

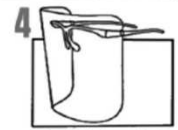

4
反対側も1~3を行
い、完成です。

- ◆ 眼鏡の上からでも使用でき、帽子をかぶったままでも装着可能。
- ◆ 髪型が崩れないタイプのフェイスガードです。

製品特徴

超透明なPPシートを使用
曇りや静電気を帯びにくい加工をしています

軽量設計
約28gの軽さで長時間の装着も可能

使い捨て用
除菌の手間が省けます

男女兼用／フリーサイズ

50セット／1カートン

(眼鏡：50個 + シールド100枚)

オープン価格

価格・納期・ロット等については下記まで
お気軽にお問合せ下さい

お問合せ：

ラックヘルスケア株式会社
〒105-0014
東京都港区芝3-43-16 KDXビル11F
TEL：03-5419-8050